

# Manual - Lupa Eletrônica




---

## O que é o Pebble?

O Pebble é uma Lupa eletrônica capaz de ampliar qualquer imagem fora do ambiente digital. Ela foi projetada especialmente para pessoas com baixa visão.

## Identifique os seguintes controles do Pebble

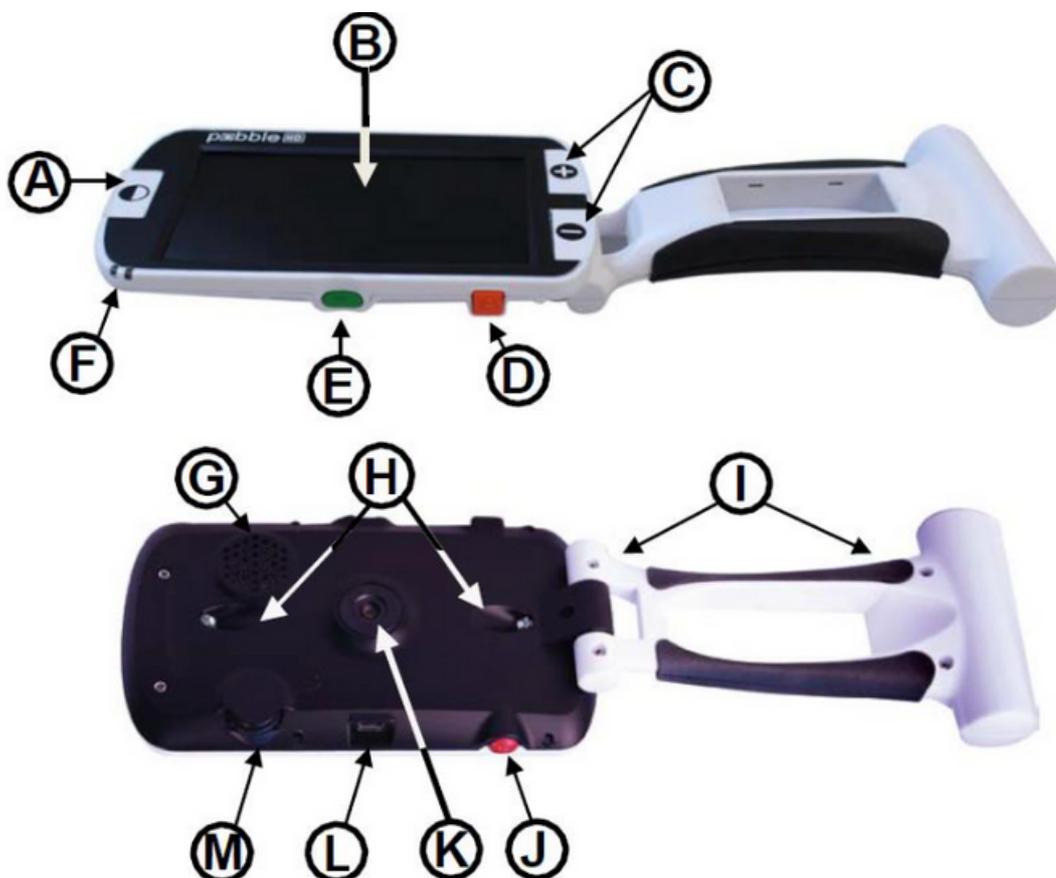



---

## **Passo 1 – Ligar /Desligar**

**1 - Ligue o Pebble pressionando e mantendo pressionado o botão Verde [LIGAR/DESLIGAR] durante pelo menos um segundo para ligar o Pebble.**

**2 - Desligue o Pebble voltando a pressionar e a manter pressionado o botão [LIGAR/DESLIGAR] durante pelo menos dois segundos.**

## **Passo 2 – Ajusta o tamanho da imagens**

**1 - Aumente o tamanho de ampliação do LCD pressionando o botão [+] TAMANHO**

**2 - Diminua o tamanho de ampliação do LCD pressionando o botão [-] TAMANHO**

---

---

## Passo 3 – Modos de visualização

**1 - Pressione o botão [MODO DE VISUALIZAÇÃO] para percorrer os 7 modos de visualização predefinidos (caso estejam ativados)**

**2 - Pressione [MODO DE VISUALIZAÇÃO] durante 2 segundos para regressar ao modo “Cor Integral”**

### Modos de Cores:

- 1** → **Imagem de Cor Integral (predefinição de fábrica – sempre ligado)**
  - 2** → **Imagem Preta e Branca**
  - 3** → **Imagem Positiva (de fábrica = fundo branco / texto preto)**
  - 4** → **Imagem Negativa (de fábrica = fundo preto / texto branco)**
-

- 
- 5 → **Seleção de Cor 1 (de fábrica = fundo azul / texto amarelo)**
  - 6 → **Seleção de Cor 2 (de fábrica = fundo preto / texto verde)**
  - 7 → **Seleção de Cor 3 (de fábrica = fundo preto / texto amarelo)**

#### **Passo 4 – Congelar imagem**

**É possível captar (“congelar”) uma imagem instantânea no display. Também pode ajustar o tamanho e os modos de visualização depois de congelar uma imagem.**

**1 - Pressione o botão Vermelho [Congelar] para captar a imagem. O Pebble emitirá um som de obturador quando captar a imagem**

**2 - Volte a pressionar o botão Vermelho [Congelar] para sair e retomar a operação normal**

---

---

## **Passo 5 – Gravar uma imagem instantânea**

**O Pebble permite gravar imagem na memória, aproximadamente 200 imagens pode ser gravadas. Essas imagens também podem ser passada para um computador mais tarde.**

**1 - Pressione o botão Vermelho [CONGELAR] durante 2-3 segundos. Ouvirá um som tipo “campainha” e será exibida uma mensagem confirmando a gravação.**

## **Passo 6 – Abrir a galeria de fotos.**

**1 - Pressione o botão LARANJA [GALERIA] durante 3 segundos e a ultima imagem gravada irá aparecer no display.**

**2 - Use os botões [+] e [-] TAMANHO para mover para a próxima imagem.**

## **Passo 7 – Apagar uma imagem**

**1 - Quando estiver na galeria, selecione uma imagem e pressione e mantenha por 2 segundos para deletar a imagem.**

---

---

## **Passo 8 – Acessar o Menu**

**1 - Pressione o botão [MODO DE VISUALIZAÇÃO] juntamente com o botão LARANJA [CONGELAR] para acessar o menu.**

**2 - Use os botões [+] e [-] TAMANHO para navegar pelas opções**

**3 - Use os botão VERMELHO [CONGELAR] para acessar a opção selecionada.**

## **Passo 9 – Acessar o horário/Data**

**1 - Pressione o botão [MODO DE VISUALIZAÇÃO] juntamente com o botão de [-] TAMANHO para acessar o horário/Data, use a mesma combinação para retorna ao normal.**

---

---

## **Passo 10 – Passa imagem para o computador**

**O Pebble tem a possibilidade de passa todas as imagem gravadas para o computador**

**1 - Plugue o cabo USB no computador**

**2 - Acesse o Pebble como se estivesse acessando um pendrive**

**2 - Acesse a pasta IMAGEM para ter acesso as imagens captura no Pebble.**

---